

MSSCS for iPad 日本語

(Mobile Skin Scope Counseling Software for iPad)

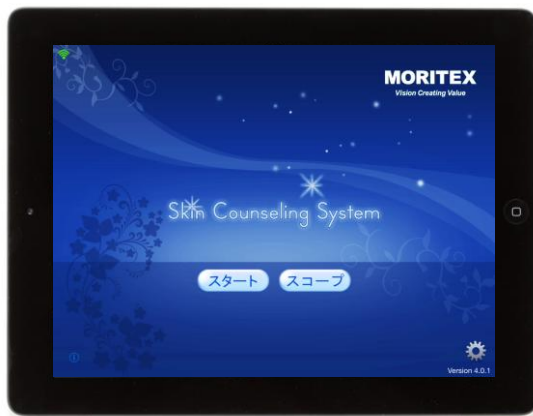

クイックユーザーズガイド ver. 1.1



MORITEX

Vision Creating Value

お使いになる前に

 警告	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。
お願い	誤った取扱をすると、Mobile Skin Scope (MSS) 本来の性能が発揮できなかったり、機能停止をまねく内容、及び利用できないなどの内容を示しています。


警告

- 万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、販売店または弊社営業所へ修理を依頼して下さい。お客様による修理は危険ですから絶対におやめ下さい。
- 万一、Mobile Skin Scope (MSS) の内部に水などの液体が入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店または弊社営業所へ修理を依頼して下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
- 改造または分解しないで下さい。火災・感電の原因になります。
- 電源コード・接続コードが痛んだ状態のまま使用しないで下さい。電源コード・接続コードが痛んだ場合は、販売店または弊社営業所へ連絡して下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
- 電源コード・接続コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないで下さい。また、重いものを乗せたり、加熱したりすると、電源コード・接続コードが破損し火災・感電の原因になります。
- めれた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因になります。
- 寒いところから暖かいところに持っていくと、結露することがあります。結露した場合は、水分が消えるまで電源を入れしないで下さい。火災・感電の原因になります。



注意

- Mobile Skin Scope (MSS)を直射日光のあたるところや、冷暖房機の近く、湿度の高いところに置かないで下さい。内部温度が上がり、火災の原因となることがあります。
- Mobile Skin Scope (MSS)を湿気の多い場所や水・油・薬品等がかかるおそれのある場所、ゴミやほこりの多い場所に置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。
- Mobile Skin Scope (MSS)をぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないで下さい。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
- レンズ部に直接目をあてたり、のぞいたりしないで下さい。レンズ部からは強い光が出ています。目を痛めるおそれがあります。
- 長時間お使いにならない時は、安全のため必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

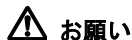

お願い



- 変色や変形の原因となることがありますので、Mobile Skin Scope (MSS)をベンジン・シンナー・アルコールなどで絶対にふかないで下さい。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を布につけ、よくしぼってからふいて、その後乾いた柔らかい布で水分をふきとって下さい。水洗いは絶対にしないで下さい。
- Mobile Skin Scope (MSS)を落としたり、ぶつけるなどの強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となることがあります。
- レンズに汚れがつくと、画像が鮮明に映らなくなります。このような場合は、修理を依頼して下さい。

1. 概要

「Counseling System for iPad (「MSSCS」)」は、ワイヤレススコープ Mobile Skin Scope (MSS)を接続できるスマートデバイス向けのアプリケーションソフトウェアです。このマニュアルでは、iPad用のアプリケーションソフトウェアについて説明します。

2. iPadへのアプリケーションのインストール

- MSSCSをiPadにインストールするには、iPadでApp Storeにアクセスし、「MSSCS」のキーワードを使用してMSSCSアプリケーションを検索し、iPadにダウンロードします。
- [App Store]アイコン → 「MSSCS」のインデックスで検索 → MSSCSをインストール

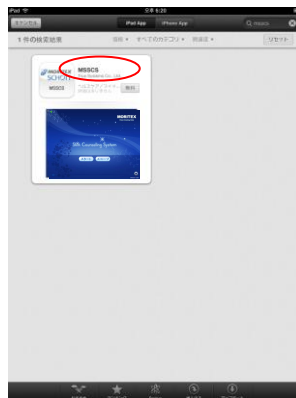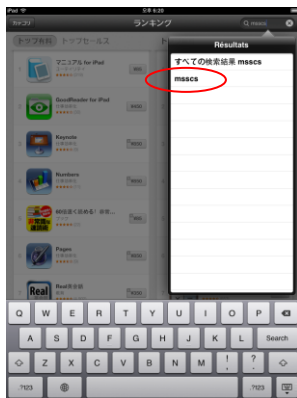

3. Mobile Skin Scope (MSS) の起動とシャットダウン

- 左ボタンを2秒間押すと起動します。
- 左ボタンを2秒間押すとシャットダウンします。



起動するには、
左ボタンを
2秒間押します。



起動画面



シャットダウンする
には、左ボタンを
2秒間押します。

4. iPad の Wi-Fi 設定

- Mobile Skin Scope (MSS) を起動します。
- iPad に表示されるネットワークリストから、iPad に接続する Mobile Skin Scope (MSS) のシリアル番号を選択します。シリアル番号は Mobile Skin Scope (MSS) の裏側に記載されています。
- 接続パスワード「11111111」(8桁)を入力します。
- 15~20秒で iPad が Mobile Skin Scope (MSS) に自動的に接続されます。



5. MSSCS と Mobile Skin Scope (MSS) の接続

MSSCSが起動すると、以下の手順でMSSへの接続が行われます。


- a) iPadと Mobile Skin Scope (MSS) の接続が確立すると、右の図のような初期画面が表示され、緑のWi-Fiアンテナが表示されます。



- b) iPadと Mobile Skin Scope (MSS) の接続が確立できない場合、エラーメッセージが表示され、MSSCSはデモモードで実行します。



- c) MSSCSの[接続]ボタンを選択すると、 Mobile Skin Scope (MSS) への接続が試行されます。

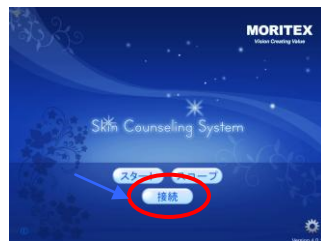

6. MSSCSプログラム

6.1 プログラムの起動

- MSSCSには、[Scope]と[Analysis]という2つの主な機能があります。
- [SCOPE]ボタンを選択すると、iPad画面にスコープイメージが表示されます。
- [START]ボタンをタップすると測定が開始されます。



: [Scope]ビューを閉じます。

1 画面

: スコープライブイメージを1つの画面に表示します。

2 画面

: スコープライブイメージを分割された2つの画面に表示します。


6.2 ユーザー情報/コース選択/測定

- a) [スタート]をタップするとポップアップメニューは表示され、“新規顧客”か“既存顧客”を選択できます。





- b) [新規顧客]を選択後、顧客名と年齢を入力します。
顧客名・年齢入力語、[Next]をタップすると、測定コースの画面が表示されます。




- c) [既存顧客]を選択すると、顧客情報ページが表示され [Next]  ボタンを選択すると、測定コースの選択画面が表示されます。




 メインメニュー画面に移動します。

- d) [Course Selection]画面で[Full Measurement]または[Selected Measurement]を選択できます。[Full Measurement]はすべての項目が個別に測定されます。
[Selected Measurement]では、測定する項目を選択できます。
- e) [Next]  ボタンを選択すると測定プロセスが開始します。

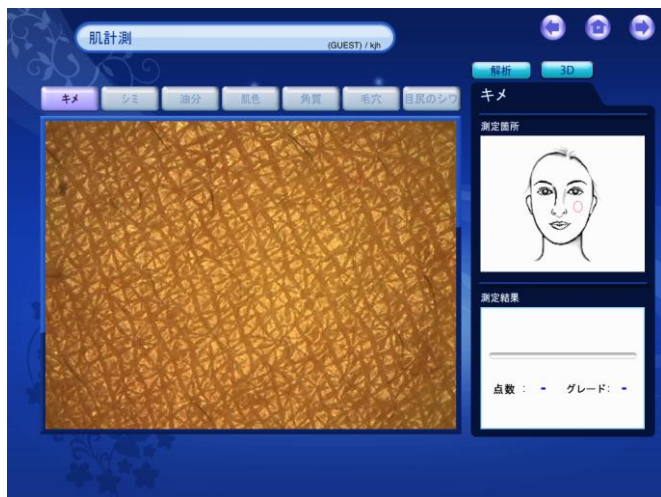

- f) 測定画面では、[Skin Texture] (キメ)、[Pigmentation] (シミ)、[Sebum] (油分)、[Skin Tone] (肌色)、[Keratin] (角質)、[Pore] (毛穴)、[Wrinkle] (目尻のシワ)を測定および分析できます。
- g) 画面の右側に表示される顔のイメージには、各項目の位置が示されます。
- h) Mobile Skin Scope (MSS)の照明モードは、測定項目に応じて自動的に変更されません。
- i) Mobile Skin Scope (MSS)およびMSSCSプログラムは、照明モードや測定項目などにおいて同期します。

- j) ライブイメージをキャプチャするには、Mobile Skin Scope (MSS) の右ボタンを押すか、iPad 上のスコープライブイメージをタップします。

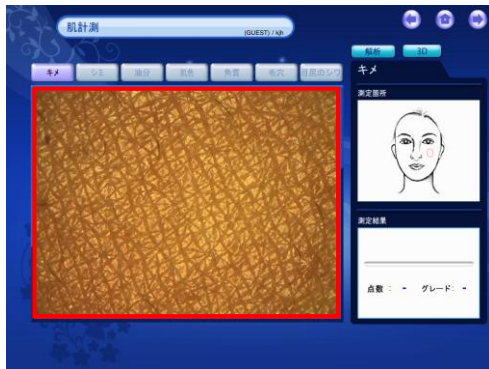

6.3 分析

- a) キャプチャしたイメージを分析するには、Mobile Skin Scope (MSS) の正面ボタンを押すか、iPad の測定画面で [Analysis] ボタンを選択します。





- b) 分析の後、皮膚のイメージはバイナリイメージ(白黒の分析イメージ)になります。画面右下のボックスに分析値と結果が表示されます。



- c) 画面右上の”3D” ボタンを押すと、肌画像が3Dイメージに変換されます。




- c) 次の測定ステップに進むには、[Next]  ボタンをタップします。この場合、キャプチャされたイメージの分析が終了します。それ以外の場合、MSSGS に警告メッセージが表示されます。
- d) メインメニュー画面に移動するには、 ボタンをタップします。


6.4 結果

- a) すべての測定が完了した後、結果画面が表示されます。
- b) 特定の項目の詳細な結果を表示するには、[RESULT]画面で目的の項目を選択します。詳細な結果では、画面右上の表で顧客の履歴データを選択できます。履歴データには最大4つのイメージが保存されます。



- c) 分析済みのイメージを表示するには、結果画面に表示されたイメージの任意の領域をタップします (⇒肌色には分析済みイメージはありません)。

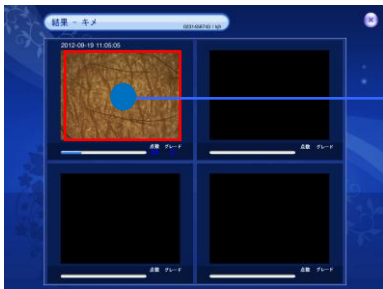

- d)  ボタンをタップすると、データを保存するか尋ねるメッセージが表示されます。
” No ” を選ぶとデータは保存されず、最初のページに戻ります。
” Yes ” を選ぶと [新規顧客] 画面が表示されます。



6.5 iPadでのMSSCSプログラムの終了

iPadでMSSCSプログラムを完全に終了するには、以下の手順を実行します。

- i) iPadのホームボタンを押してプログラムを終了します。
- ii) 次に、iPadのホームボタンを2回押して、バックグラウンドアプリを表示します。
- iii) [MSSCS]アイコンが波打ち始めるまでロングタップします。
- iv) バックグラウンドアプリの赤いマーク(🔴)をタップして完全に終了します。

★ MSSCSを完全に終了しないと、後でビューアーが実行しなくなります。



<販売元>

株式会社モリテックス
国内営業部
コスメ機器・メディカルグループ

〒351-0024
埼玉県朝霞市泉水3-13-45
www.moritex.co.jp

<製造元>

2011 True Systems Co., Ltd. All rights reserved.
すべてのデザインおよびその他の登録済記号はTrue Systemsの所有物です。
True Systemsは、予告なしに仕様を変更する権利を有します。
1年保証

True Systems Co., Ltd.
www.truesystem.co.kr
info@truesystem.co.kr